

Traducción no oficial del prospecto en alemán

Prospecto - ¡Leer con atención!

## Gel para quemaduras y heridas Medice®



### Composición:

agua purificada, glicerol al 85%, urea, dihidrogenofosfato de sodio dihidratado, fosfato dibásico de sodio, fosfato de sodio dibásico dodecahidratado, alginato de sodio, lauril-9, cloruro de bencetonio, sorbato de potasio.

### Presentación y contenido

1 envase contiene 25/50 g de gel

### Modo de acción

Gel para quemaduras y heridas con efecto refrescante. Se aplica cubriendo la lesión y permite el intercambio natural de la humedad entre la piel y la herida.

### Fabricante

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn,  
Teléfono: +49 2371/937-0, fax: +49 2371/937-329, correo electrónico info@medice.de,  
www.medice.de

### Uso previsto

Para el tratamiento de quemaduras de primer y segundo grado (aparición de ampollas), quemaduras solares, rozaduras y picaduras de insectos. Aplicar una fina película del gel sobre la lesión. El gel para quemaduras y heridas Medice® se seca lentamente, formando una delgada capa permeable que protege las partes de la piel afectadas sin influir sobre la exudación de la herida. Después de su aplicación, el gel proporciona un agradable efecto refrescante.

Por eso su uso está indicado para el tratamiento de quemaduras de primer y segundo grado (aparición de ampollas), quemaduras solares, rozaduras y picaduras de insectos.

### Contraindicaciones

***Cuándo está contraindicado el uso del gel para quemaduras y heridas Medice®***

En caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

### Medidas de precaución para el uso y advertencias

#### ***Medidas de precaución a tener en cuenta***

No aplicar en los ojos.

Si la quemadura es de mayores dimensiones o profundidad consulte a un médico antes de tratar la lesión con el gel para quemaduras y heridas Medice®.

Acuda al médico si la quemadura o la herida se enrojecen o inflaman durante el tratamiento con el gel para quemaduras y heridas Medice®, o si la cicatrización no se inicia trascurridos unos días desde el inicio del uso.

## **Interacciones**

### ***Productos sanitarios o medicamentos que influyen sobre la acción del gel para quemaduras y heridas Medice® o que pueden ver alterado su efecto***

Tenga en cuenta que esta información puede ser válida también para medicamentos o productos sanitarios utilizados recientemente.

El gel para quemaduras y heridas Medice® puede intensificar la liberación de los principios activos de otros preparados cutáneos y su absorción cutánea. Por eso, el gel para quemaduras y heridas Medice® no se debe usar con otros preparados cutáneos en el mismo lugar.

## **Posología, modo y duración del uso**

Siga las indicaciones para el uso porque, de lo contrario, es posible que el gel para quemaduras y heridas Medice® no actúe correctamente.

Cierre bien el tubo después de aplicar el gel. Para ello utilice solamente el tapón original.

Cuando use el gel para quemaduras y heridas Medice® evite doblar y romper el tubo. Enrolle siempre el tubo desde el extremo hacia arriba.

### ***Cantidad y frecuencia de la aplicación del gel para quemaduras y heridas Medice®***

Aplique una fina película del gel para quemaduras y heridas Medice® con los dedos limpios y secos, con un apósito o con un hisopo de algodón limpio. El orificio del tubo no debe entrar en contacto con la herida.

La aplicación se puede repetir tan pronto como empiece a desaparecer el efecto refrescante y protector del gel.

### ***Cómo y cuándo usar el gel para quemaduras y heridas Medice®***

El gel para quemaduras y heridas Medice® no se debe usar en áreas extensas de la piel durante un espacio de tiempo prolongado. En este preparado, el lento proceso del secado es un efecto deseado para que las zonas de piel afectadas estén protegidas durante más tiempo. Siempre que sea posible, las zonas del cuerpo expuestas no se deberán cubrir con una venda pero, si esta fuera necesaria, se puede colocar sobre la película de gel seca. Debajo del gel seco se genera rápidamente un entorno limpio en la herida que favorece la cicatrización. La película de gel es permeable al aire y a la humedad. La capa de gel no impide ver la herida, por lo que el terapeuta puede decidir en todo momento si son necesarias otras medidas adicionales. Las superficies de heridas muy exudativas se deben limpiar con gasas estériles antes de aplicar el gel para quemaduras y heridas Medice®.

### ***Duración del uso del gel para quemaduras y heridas Medice®***

La duración del uso depende de la evolución de la cicatrización.

## **Errores de uso y sobredosis**

### ***Qué hacer cuando se ha aplicado demasiada cantidad del gel para quemaduras y heridas Medice® (sobredosis intencionada o accidental)***

El gel se puede eliminar con agua templada.

## **Efectos adversos**

### ***Qué efectos adversos se pueden producir durante el uso del gel para quemaduras y heridas Medice®***

Si experimenta efectos adversos consulte a su farmacéutico o al fabricante. Incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

La tolerabilidad del gel para quemaduras y heridas Medice® es en general buena. En casos infrecuentes es posible que el componente lauril-9 cause una reacción cutánea alérgica. Si existe propensión a sufrir una reacción de este tipo, la hipersensibilidad se desarrolla a lo largo de aprox. 1-2 semanas. La urea puede causar irritaciones de carácter breve en las zonas de la piel inflamadas o en heridas húmedas.

### **Qué hacer si se producen efectos adversos**

Deje de usar el preparado y consulte a su médico.

### **Indicaciones e información sobre la caducidad del medicamento**

La fecha de caducidad está impresa en el tubo y en el envase. No utilice el gel para quemaduras y heridas Medice® después de esta fecha.

Una vez abierto el tubo, el gel para quemaduras y heridas Medice® solo se debe utilizar durante los siguientes 12 meses.

### **Cuándo no se debe usar el gel para quemaduras y heridas Medice® antes de la fecha de caducidad**

Si el tubo está dañado puede producirse una descomposición de sus componentes. No utilice el producto si el tubo está dañado.

### **Conservación del gel para quemaduras y heridas Medice®**

Conservar por debajo de 25 °C.

### **Fecha de la información:**

enero 2016

### **Explicación de los símbolos del envase**



Tener en cuenta el prospecto



No usar si el tubo está dañado



Límite superior de temperatura



Fecha de caducidad



Código de lote



Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.